

Manuel d'utilisation

NS6630B



A propos de ce manuel

Ce manuel doit uniquement être utilisé comme référence pour l'utilisation de ce modèle spécifique. Si le manuel est utilisé à d'autres fins, le fournisseur ne saurait être tenu responsable des conséquences qui en découlent.

Avertissements

L'alimentation électrique doit être coupée lors du changement de composants électriques, de l'entretien ou du nettoyage des machines.

La prise doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre afin de prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique.

Ne montez pas sur cet équipement.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'équipement et placez-le hors de leur portée.

Veillez ajuster le dossier à la position la plus haute lorsque vous quittez l'équipement.

Ne placez pas l'équipement dans des endroits humides, tels que la salle de bain, afin d'éviter les risques de choc électrique ou autres dysfonctionnements.

Gardez également les contrôleurs à l'écart de l'eau.

Ne placez pas et n'utilisez pas l'équipement dans des endroits où de la peinture/revêtement est en cours d'application ou où de l'oxygène est fourni.

Sauf sous surveillance ou instruction d'un personnel qualifié et responsable, les personnes ayant des handicaps physiques, des troubles sensoriels, des troubles mentaux, un manque d'expérience ou de bon sens, ainsi que les enfants, ne sont pas autorisés à utiliser cet équipement.

En cas de dommage à la prise, veuillez contacter un distributeur, un centre de service ou un professionnel qualifié et expérimenté pour effectuer les réparations afin d'éviter tout danger.

Veillez vous assurer qu'aucun objet accessible ne se trouve dans la course de mouvement du lit lors de son utilisation.

L'utilisation de l'équipement doit être effectuée par des professionnels formés.

Utilisation à l'intérieur uniquement.

Précautions

L'équipement doit être utilisé par une personne expérimentée, familière avec la structure, les performances et les instructions du produit, et chargée de son entretien régulier.

Lisez attentivement ce manuel avant l'installation, l'utilisation et les réglages, et conservez-le soigneusement.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour un travail de charge sur un seul côté ou un seul point.

Respectez les règles de sécurité en matière d'utilisation :

Ne surchargez pas l'équipement afin de garantir le bon fonctionnement des dispositifs de protection.

Éliminez rapidement tout facteur de risque.

Serrez régulièrement les boulons et les écrous pour éviter toute défaillance due au desserrage, au glissement, aux vibrations ou à la chute de pièces.

Lors de l'entretien, l'opérateur ne doit pas démonter les pièces du lit sans autorisation.

Le produit ne doit pas être utilisé en cas de panne.

Si un phénomène ou un bruit anormal est détecté, l'équipement doit être immédiatement arrêté pour inspection et ne pourra être remis en service qu'après résolution du problème.

L'opérateur doit être parfaitement informé des précautions décrites dans chaque section du manuel afin de garantir la sécurité des personnes et du produit.

Ce lit électrique de soins est équipé d'un cordon d'alimentation à trois fils.

Celui-ci doit être branché sur une prise à trois pôles correctement installée et mise à la terre.

Cela permet non seulement d'éviter les risques de choc électrique, mais aussi d'assurer le bon fonctionnement du lit.

Veuillez utiliser l'équipement en stricte conformité avec les étiquettes d'avertissement apposées sur le produit.

Lors du réglage de la hauteur du lit, le bouton doit être maintenu enfoncé jusqu'à ce que le lit atteigne la position souhaitée.




Attention : la durée maximale de fonctionnement continu du moteur est de 2 minutes en marche (ON).

L'entretien doit être effectué par des professionnels qualifiés.

Après chaque utilisation, nettoyez la poussière et les taches sur le cuir ou les parties en bois à l'aide d'un produit neutre.

Lors du réglage du dossier, du coussin d'assise, du repose-pieds ou de la hauteur du lit à l'aide de la commande manuelle ou de la pédale, veillez à garder vos mains, vos pieds et votre tête à l'écart des parties mobiles.

(Voir l'illustration à droite.)

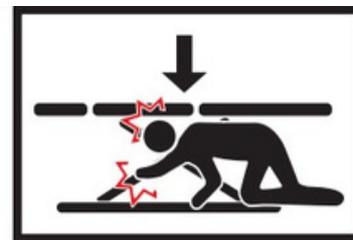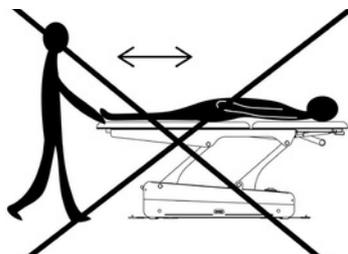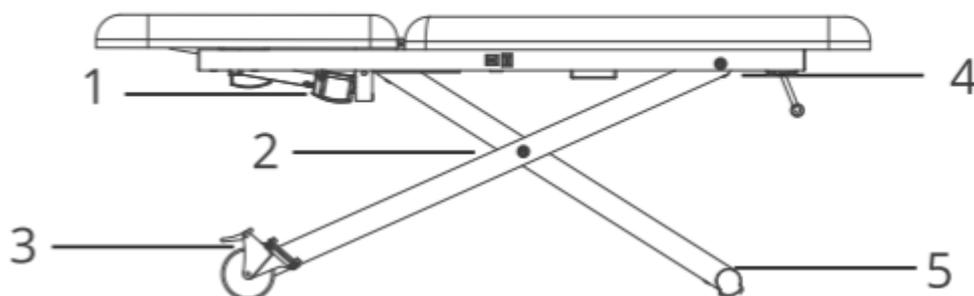


Installation


1. Placez le produit à un endroit approprié, en tenant compte de l'agencement général, de l'éclairage naturel ou artificiel et des conditions de fonctionnement du salon ou de la maison. Et conservez-le dans un environnement propre, sec et frais.
2. Ouvrez le carton d'emballage pour vérifier si le produit est intact et si les accessoires ou les pièces de rechange sont complets. Veuillez contacter le distributeur ou nous-mêmes en cas de problème.
3. Installation

Placez le produit à l'endroit approprié. Veuillez noter qu'il n'est pas nécessaire d'installer de vis supplémentaires sur le sol pour fixer le lit, car la conception d'origine a pris en compte la stabilité. Mais veuillez vous assurer que le produit est placé sur un sol ferme et plat, afin d'éviter tout accident. Si le produit tourne ou s'incline en raison d'un sol irrégulier, veuillez régler les quatre pieds en plastique (M10×30) et les écrous (M10) à l'aide d'une clé plate hexagonale, qui sont fixés sur le panneau inférieur, afin de garantir la stabilité du produit.


4. Branchez correctement la fiche du produit à l'alimentation électrique. (Comme indiqué sur la photo)

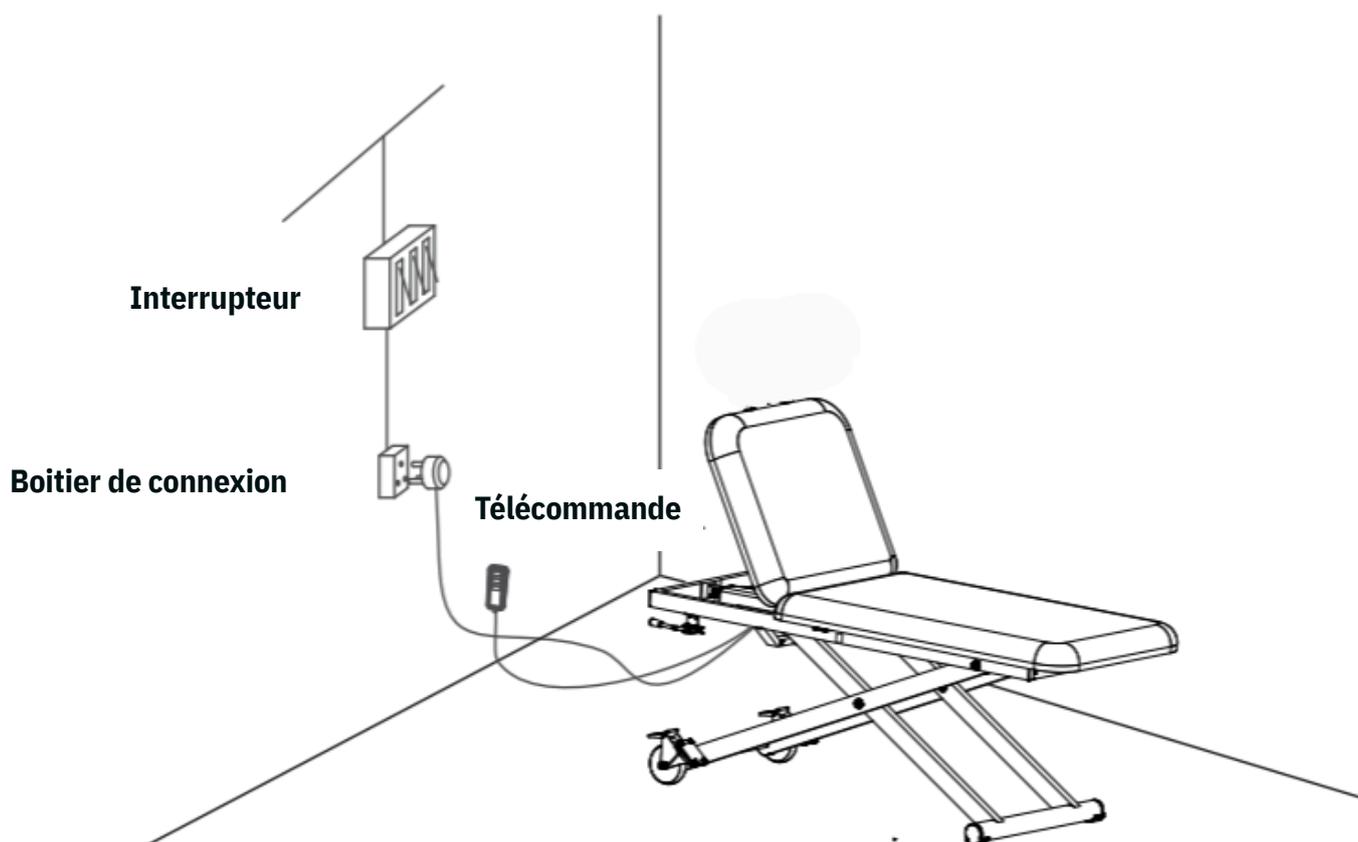

NS6630B

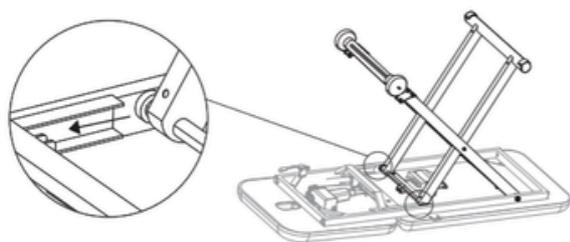

A. Insérez le cadre inférieur horizontalement dans la fente.

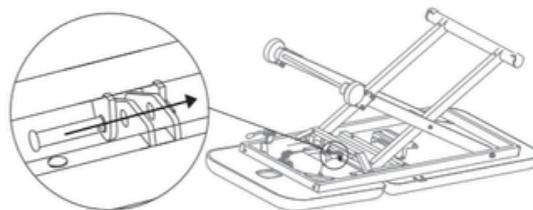


B. Faites passer la goupille à travers le cadre en fer et le trou du moteur, puis mettez le loquet.

Structure du produit

La table de soins est composée d'un moteur, de la quincaillerie, des pièces en plastique et des composants en cuir. Le contrôleur de programme possède une connexion pour la télécommande manuelle et une fonction de contrôle du mouvement du moteur.

Ce manuel, comprend la partie de contrôle de l'angle du dossier, du coussin d'assise, du repose-pieds et la partie de contrôle du levage du lit, et constitue une structure d'intégration intégrale.

La télécommande est en option.

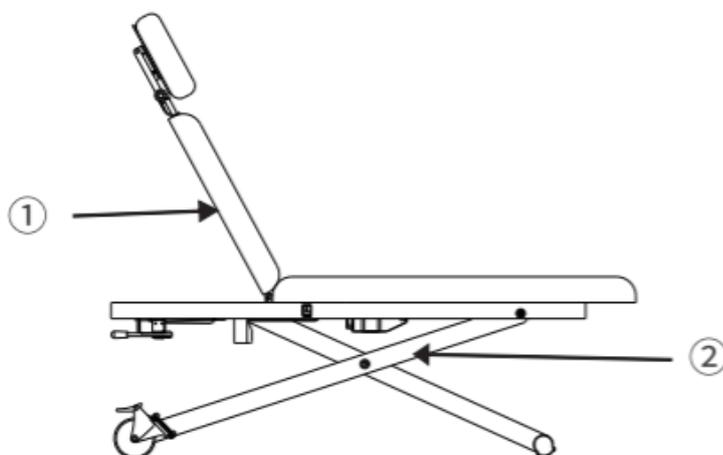


- ① Inclinaison manuelle du dossier
- ② Ajustement de la hauteur

Fonctionnement

**Bouton de commande
(configuration classique)**



Télécommande (en option)

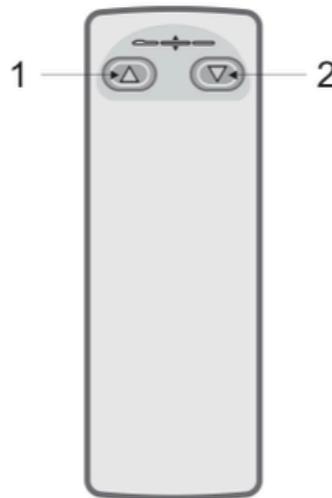


1 La table monte doucement en appuyant sur le bouton

2 La table descend doucement en appuyant sur le bouton

Paramètres techniques

Power	AC 100-120V or AC 220-240V or AC 100-240V, 50/60Hz
Maximum Power	300W
Environment Temperature	0°C~+40°C
Relative Humidity	30%~90%
Lifting Rated Load	175kg
Package Size	2210A:182×72×49cm / 2210B:192×72×49cm / 2210AY:196×78×49cm

Dimensions du produit

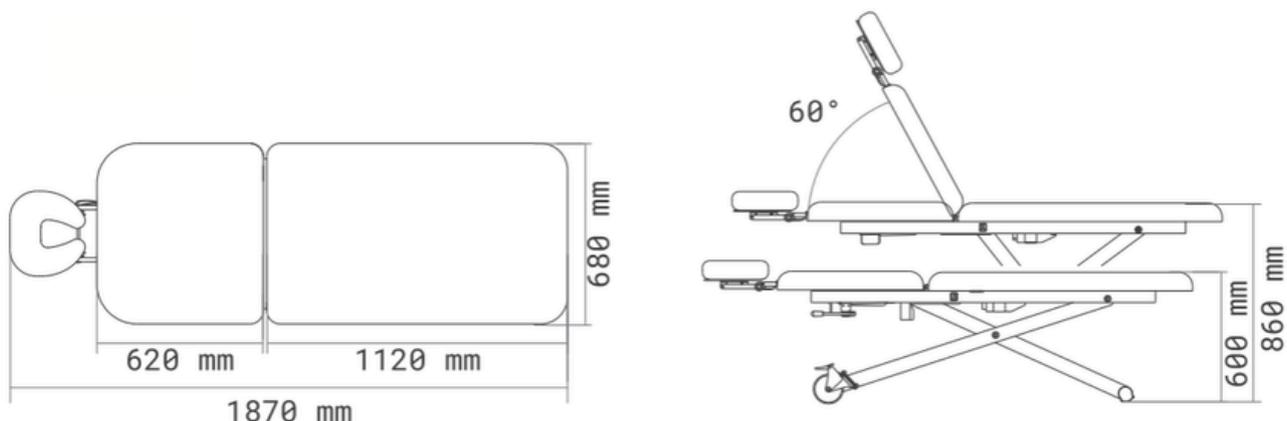


Maintenance

Après chaque traitement, veuillez utiliser uniquement une solution neutre pour nettoyer la poussière, les taches sur le cuir, les parties métalliques ou autres pièces. Les solutions désinfectantes telles que l'alcool, les solutions acides ou alcalines sont interdites. Ceci afin d'éviter de réduire la durée de vie des composants.

Veuillez lubrifier régulièrement les pièces mobiles (une fois par an).

Diagramme du circuit

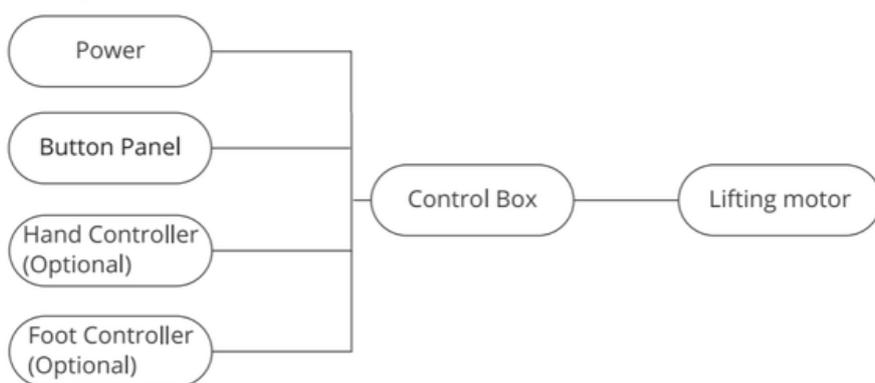

Résolution des pannes

Le moteur ne fonctionne pas normalement

Raison 1 :Le cordon d'alimentation est déconnecté ou mal branché.

Solution 1 : Connecter le cordon d'alimentation ou bien le brancher.

Raison 2 :Mauvaise qualité de la commande manuelle ou de la pédale.

Solution 2 : Remplacer la commande manuelle ou la pédale.

Raison 3 :Mauvaise qualité du boîtier de commande.

Solution 3 : Veuillez contacter le centre de maintenance ou le fournisseur pour le dépannage.

Raison 4 :Rupture du fil du moteur.

Solution 3 : Veuillez contacter le centre de maintenance ou le fournisseur pour le dépannage.

Raison 5 :Le moteur est endommagé.

Solution 3 : Veuillez contacter le centre de maintenance ou le fournisseur pour le dépannage.

Bruit anormal

Raison 1 :Les pièces rotatives manquent d'huile de lubrification.

Solution 1 : Ajouter de l'huile de lubrification.

Raison 2 :Les positions rotatives (telles que la charnière, les jeux POM, le vérin à gaz) manquent d'huile de lubrification.

Solution 2 : Ajouter de l'huile de lubrification.

Raison 3 :Problèmes de qualité du moteur.

Solution 3 : Remplacer le moteur.

Note importante : Si le problème n'est toujours pas résolu après les opérations ci-dessus, veuillez contacter le centre de maintenance ou le fournisseur pour le résoudre.

Manuel d'utilisation

NS6630B

