

MANUEL D'UTILISATION

NS273B



A propos de ce manuel

Ce manuel doit uniquement être utilisé comme référence pour l'utilisation de ce modèle spécifique. Si le manuel est utilisé à d'autres fins, le fournisseur ne saurait être tenu responsable des conséquences qui en découlent.

Avertissements

L'alimentation électrique doit être coupée lors du changement de composants électriques, de l'entretien ou du nettoyage des machines.

La prise doit être branchée sur une prise correctement installée et mise à la terre afin de prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique.

Ne montez pas sur cet équipement.

Ne laissez pas les enfants jouer avec l'équipement et placez-le hors de leur portée.

Veillez ajuster le dossier à la position la plus haute lorsque vous quittez l'équipement.

Ne placez pas l'équipement dans des endroits humides, tels que la salle de bain, afin d'éviter les risques de choc électrique ou autres dysfonctionnements.

Gardez également les contrôleurs à l'écart de l'eau.

Ne placez pas et n'utilisez pas l'équipement dans des endroits où de la peinture/revêtement est en cours d'application ou où de l'oxygène est fourni.

Sauf sous surveillance ou instruction d'un personnel qualifié et responsable, les personnes ayant des handicaps physiques, des troubles sensoriels, des troubles mentaux, un manque d'expérience ou de bon sens, ainsi que les enfants, ne sont pas autorisés à utiliser cet équipement.

En cas de dommage à la prise, veuillez contacter un distributeur, un centre de service ou un professionnel qualifié et expérimenté pour effectuer les réparations afin d'éviter tout danger.

Veillez vous assurer qu'aucun objet accessible ne se trouve dans la course de mouvement du lit lors de son utilisation.

L'utilisation de l'équipement doit être effectuée par des professionnels formés.

Utilisation à l'intérieur uniquement.

Précautions

L'équipement doit être utilisé par une personne expérimentée, familière avec la structure, les performances et les instructions du produit, et chargée de son entretien régulier.

Lisez attentivement ce manuel avant l'installation, l'utilisation et les réglages, et conservez-le soigneusement.

Ce produit ne doit pas être utilisé pour un travail de charge sur un seul côté ou un seul point.

Respectez les règles de sécurité en matière d'utilisation :

Ne surchargez pas l'équipement afin de garantir le bon fonctionnement des dispositifs de protection.

Éliminez rapidement tout facteur de risque.

Serrez régulièrement les boulons et les écrous pour éviter toute défaillance due au desserrage, au glissement, aux vibrations ou à la chute de pièces.

Lors de l'entretien, l'opérateur ne doit pas démonter les pièces du lit sans autorisation.

Le produit ne doit pas être utilisé en cas de panne.

Si un phénomène ou un bruit anormal est détecté, l'équipement doit être immédiatement arrêté pour inspection et ne pourra être remis en service qu'après résolution du problème.

L'opérateur doit être parfaitement informé des précautions décrites dans chaque section du manuel afin de garantir la sécurité des personnes et du produit.

Ce lit électrique de soins est équipé d'un cordon d'alimentation à trois fils.

Celui-ci doit être branché sur une prise à trois pôles correctement installée et mise à la terre.

Cela permet non seulement d'éviter les risques de choc électrique, mais aussi d'assurer le bon fonctionnement du lit.

Veuillez utiliser l'équipement en stricte conformité avec les étiquettes d'avertissement apposées sur le produit.

Lors du réglage de la hauteur du lit, le bouton doit être maintenu enfoncé jusqu'à ce que le lit atteigne la position souhaitée.


Attention : la durée maximale de fonctionnement continu du moteur est de 2 minutes en marche (ON).

L'entretien doit être effectué par des professionnels qualifiés.

Après chaque utilisation, nettoyez la poussière et les taches sur le cuir ou les parties en bois à l'aide d'un produit neutre.

Lors du réglage du dossier, du coussin d'assise, du repose-pieds ou de la hauteur du lit à l'aide de la commande manuelle ou de la pédale, veillez à garder vos mains, vos pieds et votre tête à l'écart des parties mobiles.

(Voir l'illustration à droite.)

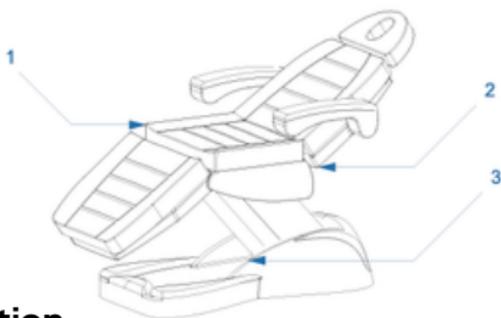

Gamme d'application

Ces produits conviennent aux soins de beauté et aux massages

Installation

En fonction de l'agencement général du salon de beauté ou de la maison, de l'éclairage, du mode d'utilisation et d'autres circonstances spécifiques, déterminez la position d'installation. L'appareil doit être placé dans un endroit propre, sec, ventilé et frais, afin de le maintenir dans un bon environnement de travail.

Inspection à l'ouverture de l'emballage

Ouvrez le carton d'emballage extérieur et vérifiez si l'ensemble de l'appareil est en bon état. Si vous avez des questions, veuillez contacter immédiatement l'unité de distribution ou notre société.


Installation du fauteuil de soins

Placez d'abord le lit de beauté à l'endroit prédéterminé. La conception de cet appareil a déjà pris en compte la stabilité de l'ensemble de l'appareil, il n'est donc pas nécessaire d'installer une base pour fixer la vis. Mais le sol avec lequel les pieds en caoutchouc du lit de beauté sont en contact doit être plat et solide, afin de ne pas provoquer d'accident si le sol est inégal. Si l'ensemble de l'appareil peut être tourné ou incliné en raison d'un sol inégal, vous pouvez régler manuellement les 4 vis situées sous le cadre inférieur du lit de beauté pour fixer le pied en caoutchouc, afin qu'il reste à niveau. Lors du réglage, le niveau de l'ensemble de l'appareil doit être maintenu pour garantir que les pieds en caoutchouc touchent le sol autant que possible afin de garantir la stabilité de l'ensemble de l'appareil.

Connexion de l'alimentation et du panneau de commande

Connectez l'alimentation, le panneau de commande manuel et le panneau de commande au pied comme indiqué dans la figure suivante. Utilisez une alimentation en courant alternatif de 110-120 V/60 Hz, 220-240 V/50 Hz.

Insérez correctement la fiche d'alimentation du produit dans le boîtier d'alimentation. (Voir l'image ci-dessous)

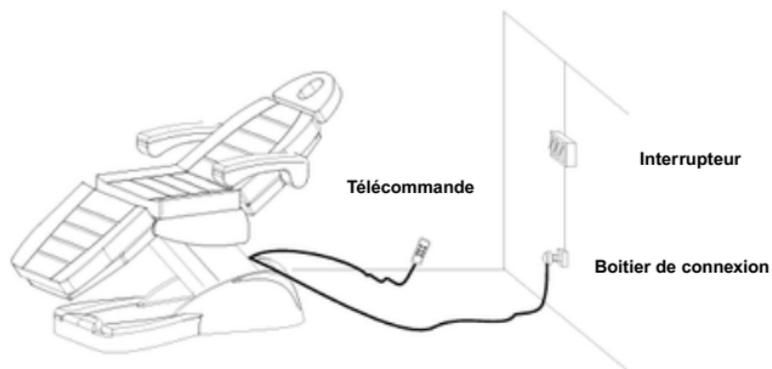

Structure du produit

Composition de la structure du produit

Le lit de beauté est composé de la télécommande, du moteur, de la quincaillerie, des pièces en plastique et des composants en cuir. Le contrôleur de programme possède une connexion pour la télécommande manuelle et une fonction de contrôle du mouvement du moteur.


Ce manuel, le lit de beauté, comprend la partie de contrôle de l'angle du dossier, du coussin d'assise, du repose-pieds et la partie de contrôle du levage du lit, et constitue une structure d'intégration intégrale.

Description des touches et méthode d'utilisation

Inclinaison
électrique du
dossier vers l'avant

Inclinaison
électrique de
l'assise vers le haut

Ajustement
électrique de la
hauteur vers le haut

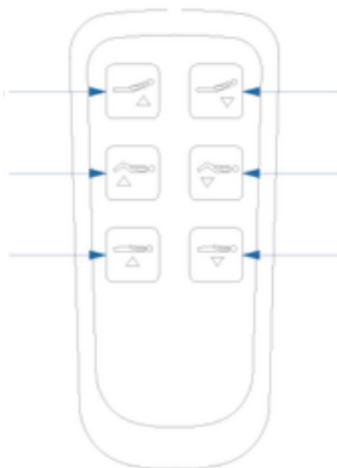


Inclinaison
électrique du
dossier vers l'arrière

Inclinaison
électrique de
l'assise vers le bas

Ajustement
électrique de la
hauteur vers le bas

Paramètres techniques

Power	AC100-120V AC100-240V50/60Hz
Max power	150W
ambient temperature	0°~+40°
relative humidity	30%~90%
Lifting rating	180KG
Package size	162*67*70CM
Net weight	80KG
Gross weight	90KG

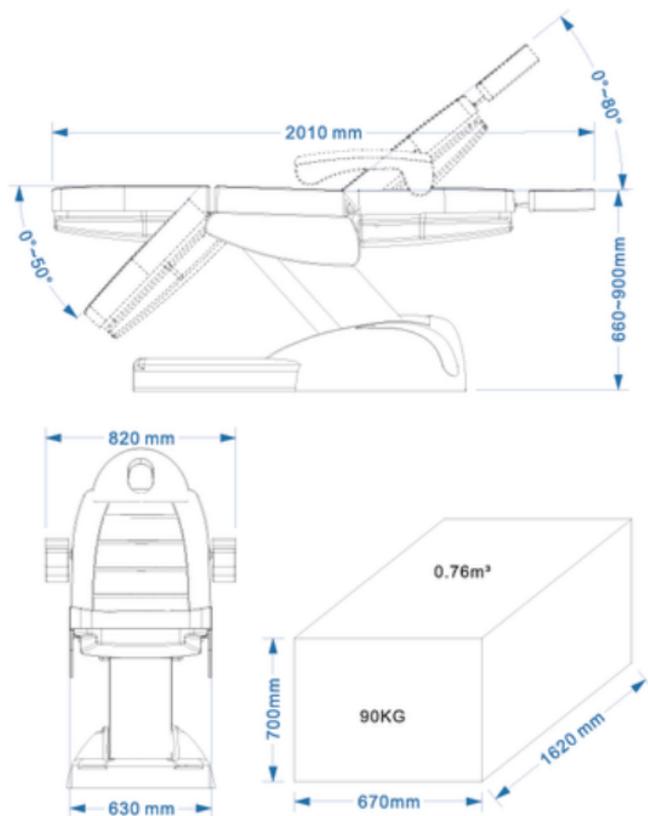

Maintenance

Après chaque traitement, veuillez utiliser uniquement une solution neutre pour nettoyer la poussière, les taches sur le cuir, les parties métalliques ou autres pièces. Les solutions désinfectantes telles que l'alcool, les solutions acides ou alcalines sont interdites. Ceci afin d'éviter de réduire la durée de vie des composants.

Veuillez lubrifier régulièrement les pièces mobiles (une fois par an).

Résolution des pannes

Bruit anormal :

Cause : Manque de lubrifiant dans les pièces mobiles.

Solution : Appliquer de l'huile lubrifiante.

Ne fonctionne pas correctement :

Cause : Cordon d'alimentation non connecté ou mal branché.

Solution : Connecter ou brancher correctement le cordon d'alimentation.

Cause : Problème de qualité de la télécommande manuelle/pédale.

Solution : Remplacer la télécommande manuelle/pédale.

Cause : Défaut du moteur.

Solution : Contacter le centre de service ou le fournisseur pour un diagnostic.

Note importante : Veuillez consulter les spécifications du produit avant utilisation. Ce manuel est fourni à titre indicatif uniquement. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.



MANUEL D'UTILISATION

NS273B

